

Single Cartridge Hand Dispenser

SHD Serier

Tiltenkt bruk

En hånddispenser for bruk med **MASTDISCS**[®] i patroner.

Innhold

SHD1 pakker inneholder en dispenser mens SHD5 pakker inneholder 5 dispensere. Andre forpacknings størrelser kan enkelte ganger være tilgjengelig.

Beskrivelse

Utstyr støpt i blå plast for bruk ved tradisjonelle disk diffusjon testmetoder.

Designet med tanke på enkelt-uttak fra patronene. Hånddispenseren gir en rask, enkel og kost-effektiv måte for å dispensere lapper fra individuelle patroner.



Prosedyre

1. Hold dispenseren med den trange enden øverst.
2. Sett patronen inn iylinderholderen med den eksponerte delen av lappen vendt nedover.
3. Reguler slik at innsnitt i patronen passer med fordypning i dispenser.
4. Trykk patronen ned inntil den klikker på plass.
5. For å dispensere en lapp, trykk den fleksible sidearmen inn mot patronen. En enkelt lapp vil bli trykket ut.
6. Når en hel beholder er brukt opp, kan denne fjernes ved å trekke den tomme hylsen opp og dispenseren kan fylles og brukes på nytt med andre patroner.

Lagring og holdbarhet

Dispenserne kan lagres ved en passende temperatur. Når de er i bruk kan de lagres ved 2 til 8°C, forutsatt at lapper og holder oppbevares i en luft-tett beholder som inneholder et selica- gel tørkemiddel. La alltid dispenser og patron få romtemperatur før åpning.

Sikkerhetsinformasjon

Kun for *in vitro* diagnostisk bruk. Følg godkjente sikkerhetsregler og aktuelle sterilteknikker. Skal kun brukes av kompetent personell. Avfall med biologisk risikomateriale skal steriliseres og håndteres i henhold til godkjente retningslinjer.